

Stand: 01.06.2023



UHC GmbH

# Aluminium-Rollator Modell-Serie Staar



# BEDIENUNGSANLEITUNG



# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Allgemeine Informationen</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>Zweckbestimmung / Indikation / Kontraindikation</b> .....                     | <b>3</b>  |
| <b>1 Typenschild</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2 Gesamtüberblick</b> .....   | <b>5</b>  |
| 2.1 Lieferumfang.....  | 5         |
| 2.2 Allgemeine Erläuterung der Funktionen und Möglichkeiten Ihres Rollators..... | 5         |
| <b>3 Sicherheitsvorschriften</b> .....   | <b>6</b>  |
| 3.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften .....                                     | 6         |
| 3.2 Warnungen für sicheren Gebrauch .....  | 6         |
| <b>4 Richtige Körperhaltung beim Gehen</b> .....                                 | <b>7</b>  |
| 4.1 Gehen mit Ihrem Rollator.....  | 7         |
| 4.2 Überwinden von Bordsteinen, Steigungen und unebenen Oberflächen.....         | 8         |
| <b>5 Gebrauchsanweisungen und Montagemöglichkeiten</b> .....                     | <b>8</b>  |
| 5.1 Technische Daten.....  | 8         |
| 5.2 Falten und Auseinanderfalten des Rollators .....                             | 9         |
| 5.3 5.3 Sitzen auf dem Rollator / Rückengurt (optionales Zubehör) .....          | 10        |
| 5.4 Bremsen.....   | 10        |
| 5.5 Einstellen der Schiebegriffhöhe .....  | 11        |
| 5.6 Anbringen und Abnehmen der Einkaufstasche .....                              | 12        |
| 5.7 Benutzung der Ankipphilfe.....   | 13        |
| 5.8 Befestigung von Gehstützen/Gehstöcken.....                                   | 13        |
| <b>6 Transport und Beförderung im Auto</b> .....                                 | <b>14</b> |
| <b>7 Betriebs- und Lagerungsbedingungen</b> .....                                | <b>14</b> |
| 7.1 Betriebsbedingungen .....  | 14        |
| 7.2 Lagerungsbedingungen .....   | 14        |
| <b>8 Probleme, Analyse und Lösungen</b> .....                                    | <b>14</b> |
| <b>9 Garantie</b> .....  | <b>15</b> |
| 9.1 Anwendungsbereich der Garantie.....  | 15        |
| 9.2 Garantie-Erklärung .....   | 15        |
| <b>10 Reinigung und Wartung</b> .....  | <b>16</b> |
| 10.1 Reinigung.....  | 16        |
| 10.2 Wartung.....  | 16        |
| <b>11 Wiedereinsatz</b> .....  | <b>16</b> |
| <b>12 Entsorgung</b> .....   | <b>16</b> |
| <b>13 Meldepflichten nach MPG und MPSV</b> .....                                 | <b>17</b> |

# SIE UND/ODER IHR BEGLEITER SOLLTEN DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN

## Allgemeine Informationen

Sie haben sich für einen Rollator von UHC GmbH entschieden, und wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Produkte bedanken.

Der Rollator ist ein Medizinprodukt.

Der Grundsatz der UHC GmbH ist die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Wir behalten uns daher das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Es ist wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig lesen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die sichere Verwendung und Wartung Ihres Rollators. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufzubewahren, um zu einem späteren Zeitpunkt etwas nachschlagen zu können. Gleichzeitig dient die Bedienungsanleitung als Garantiebescheinigung.

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind allgemeine Richtlinien, die entsprechend breit gefasst sind.

Der Rollator erfordert regelmäßige Wartung, die Sie allerdings größtenteils selbst durchführen können. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, Ihren Rollator einmal pro Jahr von einem Fachhändler inspizieren zu lassen.

## Achtung!

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie informative Kommentare und Warnhinweise. Diese sind mittels Symbolen und Beschriftung folgendermaßen deutlich gekennzeichnet.



### **Tip**

Informationen.



### **Warnung:**

Um Verletzungen zu vermeiden, müssen die Warnhinweise befolgt werden.

## Kontakt Daten Ihres Fachhändlers

Tragen Sie bitte die Kontaktdaten Ihres Fachhändlers hier ein:

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Faxnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Website: \_\_\_\_\_

### Zweckbestimmung / Indikation / Kontraindikation

Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Rollator darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere zum Transportieren schwerer Lasten, ist bestimmungswidrig und gefährlich.

#### Indikation

Der Rollator ist angezeigt für bewegungs- eingeschränkte Personen mit maximalem Körpergewicht von 125 kg als Gehhilfe und eingeschränkte Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

#### Kontraindikation

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei:


- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- bei einem Körpergewicht über 125 kg

#### ⓘ Bitte beachten:

Wenn Sie im Umgang mit dem Rollator in irgendeiner Weise unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Angehörigen der Gesundheitsberufe und fragen diese um Rat und Unterstützung.

# 1 Typenschild

Ihr Rollator ist mit einer eindeutigen Seriennummer „SN“ ausgestattet. Sie können diese Nummer auf dem Typenschild am Rahmen Ihres Rollators ablesen. Darüber hinaus finden Sie die Erläuterung der verschiedenen Daten auf dem untenstehenden exemplarischen Typenschild.

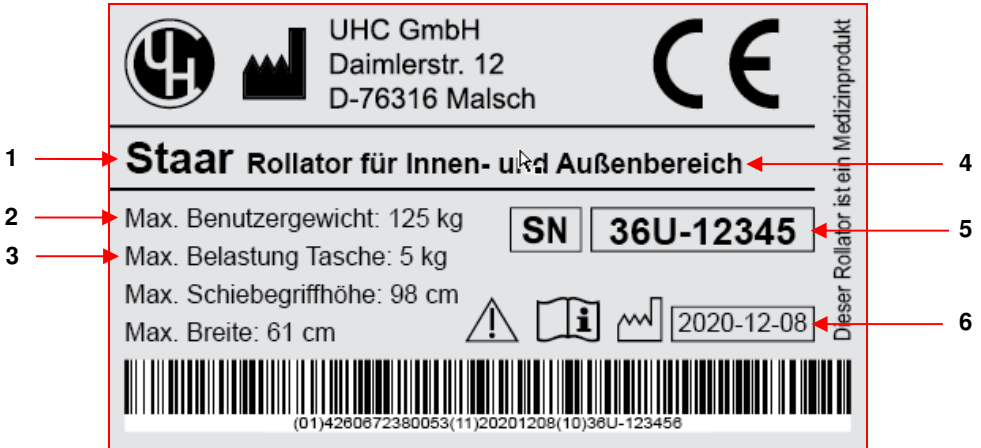

- 1. Modellbezeichnung:** Der Modellname Ihres Rollators.
- 2. Max. Benutzergewicht:** Zum Schutz von Rollator und Benutzer maximal zulässiges Gewicht des Benutzers.
- 3. Max. Belastung Tasche:** Die Einkaufstasche darf nur bis max. 5 kg belastet werden.
- 4. Verwendung:** Einsatzbereiche Ihres Rollators.
- 5. Seriennummer:** Jeder Rollator hat eine eindeutige Seriennummer. Geben Sie diese Nummer an, wenn Sie technische Fragen haben oder Ersatzteile benötigen.
- 6. Produktionsdatum:** Produktionsdatum Ihres Rollators.

## 2 Gesamtüberblick

### 2.1 Lieferumfang



|    |   |           |                |
|----|---|-----------|----------------|
| 1  | Schiebegriff                                    | 6         | Kreuzstrebe    |
| 2  | Bremshebel                                      | 7         | Hinterrad      |
| 3  | Rückengurt                                      | 8         | Seitenrahmen   |
| 4  | Sitz  | 9         | Einkaufstasche |
| 5  | Knopf zur Höhenverstellung<br>des Schiebegriffs | 10        | Vorderradgabel |
| 11 |   | Vorderrad |                |

Ihr Rollator umfasst eine Anzahl von Elementen und Bauteilen. Sie sollten diese kennen, bevor Sie fortfahren, die Bedienungsanleitung zu lesen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### 2.2 Allgemeine Erläuterung der Funktionen und Möglichkeiten Ihres Rollators

Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Rollator ist ausgestattet mit Multifunktionsbremsen und stabilen Leichtlauf-Rädern. Der Rollator ist insbesondere entwickelt worden, um an den Benutzer individuell angepasst werden zu können. Sie müssen diese Bedienungsanleitung befolgen, um einen guten, optimalen und sicheren Gebrauch Ihres Rollators zu gewährleisten.

### 3 Sicherheitsvorschriften

UHC GmbH lehnt jegliche Verantwortung für Körper- oder Sachschäden, die bei nicht ordnungsgemäßigem Einsatz auftreten können, ausdrücklich ab. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Einhaltung der Anweisungen für die Verwendung, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist der Rollator ein äußerst sicheres und stabiles Produkt. Es ist jedoch möglich, dass gefährliche Situationen auftreten können, wenn der Rollator nicht richtig verwendet wird.

#### 3.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Achten Sie auf Ihren Rollator, indem Sie regelmäßige Überprüfungen vornehmen. Wenn ein Teil Ihres Rollators nicht richtig funktioniert, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.

##### **ⓘ Warnung:**

Sie müssen Ihren Rollator in gutem Zustand halten, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

#### 3.2 Warnungen für sicheren Gebrauch

##### **ⓘ Warnungen:**

- ➔ Rollator nicht auf Straßen verwenden. Wenn möglich, Gehwege benutzen;
- ➔ Rollator nicht im Sand, rauen Bereichen, nassen und rutschigen Oberflächen oder Oberflächen mit wenig Griffigkeit verwenden;
- ➔ Fahren Sie nicht unkontrolliert über Bordsteine;
- ➔ Betätigen Sie die Parkbremse, wenn Sie mit dem Aufzug fahren oder wenn Sie sich auf den Rollator setzen bzw. wieder aufstehen möchten;
- ➔ Das maximale Benutzergewicht ist auf dem Typenschild Ihres Rollators angegeben;
- ➔ Schieben Sie den Rollator nicht zu weit vor sich her, dies könnte Stürze verursachen oder Körper-Fehlhaltungen;
- ➔ Unautorisierte Änderungen und/oder Verwendung von Teilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Verletzungen des Benutzers und/oder Schäden am Rollator führen;
- ➔ Vor der Benutzung Ihres Rollators prüfen Sie bitte, ob die Bremsen einwandfrei funktionieren;
- ➔ Nach dem Auseinanderfalten des Rollators prüfen Sie bitte, ob der Faltmechanismus korrekt eingerastet ist;
- ➔ Betätigen Sie die Parkbremse, wenn Sie den Rollator abstellen;



- ➔ Stellen Sie sicher, dass die Schiebegriffe Ihres Rollators auf die korrekte Höhe eingestellt sind, um Stürze oder Körper-Fehlhaltungen zu vermeiden;
- ➔ Achten Sie beim Falten des Rollators darauf, dass Sie sich nicht die Fingers an beweglichen Teilen einklemmen. Dies kann zu Verletzungen führen;
- ➔ Verwenden Sie den Rollator nicht zum Transport von Personen oder schweren Lasten;
- ➔ Lassen Sie keine Kinder mit dem Rollator spielen;
- ➔ Verwenden Sie den Rollator nicht, wenn die Bremsen nicht funktionieren;
- ➔ Der Rollator darf nicht bewegt werden, während Sie darauf sitzen;
- ➔ Alle Räder müssen zu jeder Zeit des Gebrauchs Bodenkontakt haben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rollator einen sicheren Stand hat;
- ➔ Betätigen Sie die Parkbremse, bevor Sie auf den Sitz des Rollators sitzen;
- ➔ Benutzen Sie den Rollator nicht, wenn er beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist.

## 4 Richtige Körperhaltung beim Gehen

Der Rollator ist für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit, mit Gleichgewichtsstörungen oder anderen Gehbehinderungen ausgelegt. Die Nutzung des Rollators hilft Menschen bei der Verbesserung ihrer Mobilität.

### 4.1 Gehen mit Ihrem Rollator

Wenn Sie mit Ihrem Rollator gehen, achten Sie bitte darauf, dass Sie stets eine aufrechte Körperhaltung haben und den Rollator so nahe wie möglich an Ihrem Körper führen (siehe Abbildungen unten), um die bestmögliche Unterstützung beim Gehen und eine sichere Fortbewegungen zu gewährleisten.



Richtig



Falsch

## 4.2 Überwinden von Bordsteinen, Steigungen und unebenen Oberflächen

### **i** **Warnung:**

- Fahren Sie nicht unkontrolliert über Bordsteine!
- Überprüfen Sie Steigungen immer auf Risiken, wie Löcher oder rutschige und unebene Oberflächen, bevor Sie weitergehen.

Wenn Sie einen Bordstein überwinden möchten, sollten Sie dies in folgender Weise tun:

#### **Bordsteine nach oben überwinden:**

- Schieben Sie den Rollator mit den Vorderrädern an den Bordstein heran;
- Kippen Sie den Rollator an (s. 5.7), so dass die Vorderräder angehoben werden;
- Wenn die Vorderräder auf dem Bordstein stehen, den Rollator wieder absetzen;
- Nun schieben Sie den Rollator vorwärts, mit den Hinterrädern an den Bordstein heran, und heben die Hinterräder auf den Bordstein.

#### **Bordsteine nach unten überwinden:**

- Schieben Sie den Rollator mit den Vorderrädern an den Bordstein heran, entlasten ihn vorne etwas und fahren vorsichtig über den Bordstein;
- Wenn die Vorderräder über den Bordstein hinaus sind, setzen Sie den Rollator vorsichtig wieder ab;
- Nun schieben Sie den Rollator vorwärts mit den Hinterrädern an den Bordstein heran, heben die Hinterräder über den Bordstein und setzen den Rollator vorsichtig wieder ab.

## 5 **Gebrauchsanweisungen und Montagemöglichkeiten**

In diesem Kapitel werden alle Möglichkeiten Ihres Rollators beschrieben.

### 5.1 Technische Daten

#### **Rollator Modell Staar**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Material Rahmen und Kreuzstrebe:                   | Aluminium, Pulverbeschichtung |
| Material Sitz und Rücken                           | Nylon, schwarz                |
| Material Schiebegriffe                             | PVC                           |
| Schiebegriffhöhe 7-fach verstellbar (min. / max.): | 81 - 98 cm                    |
| Gesamthöhe (entfaltet / gefaltet):                 | 81 - 98 cm                    |
| Gesamtlänge (entfaltet / gefaltet):                | 74 cm                         |
| Gesamtbreite (entfaltet / gefaltet)::              | 61 cm / 21 cm                 |
| Sitzbreite / Abstand zwischen Schiebegriffen:      | 46 cm                         |
| Sitztiefe:   | 25 cm                         |
| Sitzhöhe (vom Boden gemessen):                     | 60 cm                         |
| Wendekreis:  | 95 cm                         |
| Eigengewicht mit / ohne Zubehör:                   | 7,2 kg / 6,8 kg               |
| Empfohlene Körpergröße:                            | 165 - 195 cm                  |
| Maximales Benutzergewicht:                         | 125 kg                        |
| Max. Zuladung der Einkaufstasche:                  | 5 kg                          |

## 5.2 Falten und Auseinanderfalten des Rollators

Ihr Rollator ist faltbar. Auf diese Weise können Sie Ihren Rollator leicht tragen, abstellen oder transportieren. Im gefalteten Zustand steht Ihr Rollator in aufrechter, standsicherer Position.

### **i** **Warnung:**

- ➔ Achten Sie beim Falten des Rollators darauf, dass Sie sich nicht die Finger an beweglichen Teilen einklemmen. Dies kann zu Verletzungen führen!

### **Falten des Rollators**

- ➔ Achten Sie darauf, dass Sie hinter dem Rollator stehen;
- ➔ Fassen Sie die Entriegelungsschleife am Sitz (Abb. 1) und ziehen diese hoch;  
**Die Entriegelungsschleife darf nicht als Tragegurt verwendet werden!**
- ➔ Drücken Sie die Schiebegriffe zusammen, bis der Rollator gefaltet ist (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

### **Auseinanderfalten des Rollators**

- ➔ Achten Sie darauf, dass Sie hinter dem Rollator stehen;
- ➔ Drücken Sie die Schiebegriffe auseinander, bis der Rollator entfaltet ist (Abb. 3);
- ➔ Stellen Sie sicher, dass der Rollator vollständig auseinandergefaltet ist, indem Sie auf beide Sitzrohre drücken (Abb. 4). Sie hören ein Klicken, das bestätigt, dass die Verriegelung des Rollator korrekt eingerastet ist.



Abb. 3



Abb. 4

### 5.3 Sitzen auf dem Rollator / Rückengurt (optionales Zubehör)

- Betätigen Sie die Parkbremse, bevor Sie sich auf den Rollator setzen;
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Beine zwischen den Hinterrädern befinden, wenn Sie sitzen, und Ihr Rücken zur Fahrtrichtung zeigt (Abb. 5).
- Der Rückengurt (optionales Zubehör) ermöglicht ein Anlehnen während des Sitzens. Stellen Sie den Rückengurt vor der Benutzung auf die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie beide Feststellschrauben nach dem Einstellvorgang von Hand wieder fest!

**Achtung:** Der Rückengurt ist nur zum Anlehnen während des Sitzens konzipiert. Setzen Sie sich nicht auf den Rückengurt, und befestigen Sie keine Gegenstände daran!



Abb. 5

### 5.4 Bremsen

Ihr Rollator ist mit zwei Arten von Bremsen ausgestattet. Während der Fahrt benutzen Sie die Fahrbremse. Wenn Sie den Rollator abstellen, benutzen Sie die Parkbremse.

#### Fahrbremse

Während der Fahrt können Sie den Rollator mit der Fahrbremse abbremesen.

- Wenn Sie beim Schieben des Rollators die Geschwindigkeit reduzieren möchten, ziehen Sie beide Bremshebel gleichmäßig nach oben (Abb. 6);
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Rollator nicht gleichzeitig schieben, während Sie die Bremsen betätigen, ansonsten kann dies zu Schäden an den Reifen und Bremsklötzen führen;

**Achtung:** Benutzen Sie den Rollator nicht, wenn die Bremsen defekt sind s. Punkt 3.2!



Abb. 6

## Parkbremse

Wenn Sie den Rollator abstellen oder sich auf den Sitz setzen, betätigen Sie zuvor die Parkbremse.

- Drücken Sie **beide Bremshebel** nach unten, bis diese hörbar einrasten (Abb. 7), damit ist die Parkbremse aktiviert;
- Zum Lösen der Parkbremse ziehen Sie beide Bremshebel wieder nach oben.

**Achtung:** Benutzen Sie den Rollator nicht, wenn die Bremsen defekt sind s. Punkt 3.2!



Abb. 7

## 5.5 Einstellen der Schiebegriffhöhe

Sie können die Höhe der Schiebegriffe des Rollators auf Ihre Körpergröße einstellen. Es sind 8 unterschiedliche Höheneinstellungen möglich.

- Achten Sie darauf, dass Sie hinter dem Rollator stehen;
- Drücken Sie den Federknopf am Seitenrahmen (Abb. 8);
- Ziehen bzw. schieben Sie den Schiebegriff auf die gewünschte Höhe (Abb. 9);
- Drücken Sie dabei den Federknopf bei jeder Höhenstufe erneut;
- Stellen Sie sicher, dass beide Schiebegriffe gleich hoch eingestellt und korrekt fixiert sind, indem Sie sie auf und ab bewegen, bis beide Federknöpfe hörbar einrasten;
- Die Schiebegriffe sind nun eingestellt und verriegelt.



Abb. 8



Abb. 9

## 5.6 Anbringen und Abnehmen der Einkaufstasche

Sie müssen die Einkaufstasche nicht entfernen, um den Rollator zu falten. Die Einkaufstasche faltet sich mit dem Rahmen des Rollators zusammen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Einkaufstasche leer ist, bevor Sie den Rollator falten. Wenn Sie die Einkaufstasche abnehmen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

### Abnehmen der Einkaufstasche

- Ziehen Sie die Entriegelungsschleufe auf dem Sitz nach oben (Abb. 10);
- Stellen Sie sich vor den Rollator;
- Greifen Sie die Tasche mit beiden Händen und ziehen diese aus den Trägerbolzen zu sich hin (Abb. 11);



Abb. 10



Abb. 11

### Anbringen der Einkaufstasche

- Ziehen Sie die Entriegelungsschleufe am Sitz nach oben (Abb. 12);
- Stellen Sie sich vor den Rollator;
- Greifen Sie die Tasche mit beiden Händen;
- Hängen Sie die Trägerschlaufen der Einkaufstasche in die Trägerbolzen links und rechts am Rahmen (Abb. 13).



Abb. 12



Abb. 13

## 5.7 Benutzung der Ankipphilfe

Wenn Sie die Ankipphilfe benutzen möchten, um z.B. einen Bordstein zu überwinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Treten Sie mit dem Fuß auf die Ankipphilfe, um die Vorderräder anzuheben (Abb. 14);
- Nehmen Sie den Fuß von der Ankipphilfe, um die Vorderräder wieder auf dem Boden abzusetzen.



Abb. 14

## 5.8 Befestigung von Gehstützen/Gehstöcken

- Stellen Sie Ihre Gehhilfe in den Gehstützenhalter unten am Rahmen (Abb. 15);
- Lösen Sie das Klettband oben am Rückengurt des Rollators und befestigen Ihre Gehhilfe damit am Rollator (Abb. 16);
- Achten Sie darauf, dass die Gehhilfe während der Fahrt sicher befestigt ist.



Abb. 15



Abb. 16

## 6 Transport und Beförderung im Auto

Ihr Rollator ist faltbar, um leicht mit dem Auto transportiert werden zu können. Falten Sie den Rollator wie in Punkt 5.2 beschrieben. Nehmen Sie ggf. die Einkaufstasche ab wie in Punkt 5.6 beschrieben. Nun können Sie den Rollator ganz einfach in das oder aus dem Fahrzeug heben (Abb. 17).



Abb. 17

## 7 Betriebs- und Lagerungsbedingungen

### 7.1 Betriebsbedingungen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeit:  | 20 % bis 80 %     |

### 7.2 Lagerungsbedingungen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit:  | 30 % bis 60 %     |

## 8 Probleme, Analyse und Lösungen

Die folgende Anleitung zur Fehlersuche listet einige allgemeine Probleme auf, die auftreten können, und bietet Korrekturmaßnahmen für die genannten Probleme.

| Problem                         | Mögliche Ursache   | Lösung                             |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Räder drehen sich nicht richtig | Räder sind schmutzig                                       | Reinigung der Räder                |
| Fahrbremse funktioniert nicht   | → Bremsklötze sind verschlissen<br>→ Bremse ist beschädigt | Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler |
| Parkbremse funktioniert nicht   | → Bremsklötze sind verschlissen<br>→ Bremse ist beschädigt | Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler |
| Reifen sind abgefahren          |  | Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler |



## 9 Garantie

### 9.1 Anwendungsbereich der Garantie

Für Ihren Rollator gewähren wir eine Werksgarantie. Allerdings ist es möglich, dass Ihr Fachhändler Ihnen eine zusätzliche Garantie bietet. Diese Bedienungsanleitung behandelt nur die Werksgarantie, wie sie von der UHC GmbH gewährt wird. Die Garantie ist begrenzt auf Materialfehler und versteckte Mängel.

#### **Warnung:**

UHC GmbH kann keinerlei Haftung für etwaige Beschädigungen übernehmen. Auch wenn diese Bedienungsanleitung mit Sorgfalt erstellt wurde, ist diese nicht exklusiv. Die Garantie ist nur im angegebenen Zeitraum gültig. Wenn Anpassungen am Rollator vorgenommen werden, die strukturelle Auswirkungen auf das Produkt haben, oder keine Originalteile für Reparaturen verwendet werden, erlischt die Gewährleistung vollständig.

### 9.2 Garantie-Erklärung

Die Bedienungsanleitung dient als Garantief formular. Tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Fachhändlers auf Seite 3 ein und bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

#### **Garantiebedingungen**

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit, wird Ihr Rollator im Falle eines Schadens repariert oder ersetzt werden.

#### **Bitte beachten:**

→ Die Garantie ist nicht übertragbar.

Die Garantie beinhaltet keine Arbeits- und Frachtkosten für Reparaturen.

Unter normalen Umständen wird keine Haftung übernommen, wenn am Rollator Ersatz oder Reparaturen als direkte Folge folgender Tatbestände fällig werden:

- Mangelhafte Wartung des Rollators und seiner Teile entsprechend den Empfehlungen des Herstellers, oder Nichtverwendung von Originalteilen;
- Beschädigung durch Unachtsamkeit, Unfall oder falschen Gebrauch;
- Modifikation des Rollators oder von Teilen, in einer von den Angaben des Herstellers abweichenden Art und Weise oder Ausführung von Reparaturen;
- Wenn das Produkt nicht mit werksseitiger Seriennummer und Typenschild wie in der Anleitung beschrieben ausgestattet ist, siehe Kapitel 1.

Der Rollator, der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und gezeigt wird, kann von Ihrem Modell in Details abweichen. Alle Anweisungen sind maßgeblich, unabhängig von leichten Abweichungen. Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Zeichnungen, Maße und Gewichte, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben werden, sind Näherungswerte und können geringfügig von den für Ihren Rollator zutreffenden Spezifikationen abweichen.

## 10 Reinigung und Wartung

### 10.1 Reinigung

Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden Sie dafür eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keinen Dampfstrahler und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

Trocknen Sie den Rollator nach der Reinigung ab. Trocknen Sie den Rollator auch ab, nachdem Sie damit im Regen gefahren sind.

### 10.2 Wartung

Ihr Rollator braucht regelmäßige Wartung. Ein schlecht gewarteter Rollator kann zu technischen Problemen führen bis hin zum Verlust der Garantieansprüche.

Vorbeugende Wartung ist sehr wichtig, und viele dieser Dinge können Sie ganz einfach selbst tun, oder einen Freund oder ein Familienmitglied kann Ihnen helfen. Wir zeigen untenstehend die Wartung, die Sie selbst durchführen können.

| <b>Inspektion</b>                                    | <b>Täglich</b> | <b>Monatlich</b> | <b>Jährlich</b> | <b>Durchführung</b> |
|--|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Funktion der Bremsen                                 | X              |                  |                 | Benutzer            |
| Fester Sitz des optionalen Rückengurts               | X              |                  |                 | Benutzer            |
| Überprüfung der Räder und Drehbarkeit der Lenkgabeln | X              |                  |                 | Benutzer            |
| Reinigung  |                | X                |                 | Benutzer            |
| Überprüfung der Stabilität des Rahmens               |                |                  | X               | Fachhändler         |
| Kontrolle der Radlager                               |                |                  | X               | Fachhändler         |

## 11 Wiedereinsatz

Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet. Übergeben Sie bitte bei der Weitergabe des Rollators an den neuen Nutzer sämtliche, für eine sichere Handhabung notwendigen, technischen Unterlagen. Der Rollator muss zuvor - wie oben angegeben - überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

## 12 Entsorgung

Bitte verhalten Sie sich umweltbewusst und führen den Rollator bzw. Komponenten davon am Ende der Nutzungsdauer Ihrer regionalen Recyclingeinrichtung zu oder geben Sie das Produkt an den Fachhändler zurück. Dieser wird den Rollator nach einer fachgerechten Reinigung bzw. Desinfektion an den Hersteller zurücksenden, der den Rollator entsorgt bzw. recycelt.

Die Verpackungsmaterialien können Sie entweder zum Recycling geben oder bei Ihrem Fachhändler zurücklassen.

## 13 Meldepflichten nach MPG und MPSV

### Meldepflichten der Betreiber und Anwender von Medizinprodukten nach MPG und MPSV

Das Medizinprodukte-Beobachtungs- und -Meldesystem ist ein wesentliches Element der Sicherheitsphilosophie für Medizinprodukte und hat das Ziel, für einen wirksamen Schutz von Patienten, Anwendern und Dritten bei deren Anwendung zu sorgen. Zur Erreichung dieses Ziels müssen alle Beteiligten, darunter auch die Betreiber und Anwender von Medizinprodukten, gemäß den §§ 3 (2) und 5 (2) der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV), Vorkommnisse unverzüglich an die zuständige Bundesoberbehörde melden.

#### Vorkommnisse sind:

1. jede Funktionsstörung oder
2. jeder Ausfall und jede Änderung der Merkmale oder der Leistungen oder
3. jede unsachgemäße Kennzeichnung oder Gebrauchsanweisung eines Medizinproduktes, die zum Tode oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte.

#### Meldungen:

Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller des Medizinproduktes und an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist. Es ist die primäre Aufgabe des Herstellers, geeignete Maßnahmen zur Risikoabwehr zu ergreifen.

Die Adresse des Herstellers finden Sie auf der Produkt- bzw. Verpackungskennzeichnung und in dieser Gebrauchsanweisung.

#### Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**UHC GmbH**

Daimlerstr. 12

**D-76316 Malsch**

Telefon: 0 72 46 / 94 32 100

Telefax: 0 72 46 / 94 32 109

E-Mail: [info@uhc-gmbh.de](mailto:info@uhc-gmbh.de)

Website: [www.uhc-gmbh.de](http://www.uhc-gmbh.de)